

Conseils pour commencer

Configurez les 2 codes de test principaux dans votre système de gestion vétérinaire

Définissez ces codes de test et leurs codes complémentaires associés dans votre système de gestion vétérinaire. Des codes supplémentaires doivent être établis dans le cas où un pathologiste ne peut pas interpréter les lames soumises et qu'une nouvelle analyse ou une nouvelle soumission est requise.


Assurez-vous de définir des codes supplémentaires sans frais pour éviter que le propriétaire de l'animal ne soit facturé deux fois.

Codes primaires	Codes de test des modules complémentaires associés
DCYTO (Cytologie digital, 1 site)	DCRSCN1 (Module complémentaire 1 Nouvelle analyse de la cytologie digital)
	DCRSCN2 (Module complémentaire 2 Nouvelle analyse de la cytologie digital)
	DCRSUB1 (Module complémentaire 1 Nouvelle soumission en cytologie digital)
	DCRSUB2 (Module complémentaire 2 Nouvelle soumission en cytologie digital)
DCBCPR (Examen digital d'une NGC par un pathologiste)	DCBCRSCN1 (Module complémentaire 1 Nouvelle analyse digital d'une NGC par un pathologiste)
	DCBCRSCN2 (Module complémentaire 2 Nouvelle analyse digital d'une NGC par un pathologiste)
	DCBCRSUB1 (Module complémentaire 1 Nouvelle soumission d'analyse digital d'une NGC par un pathologiste)
	DCBCRSUB2 (Module complémentaire 2 Nouvelle soumission d'analyse digital d'une NGC par un pathologiste)

S'assurer que les tests de cytologie digital sont sur une demande distincte des autres échantillons de laboratoire

Créez 1 à 2 lames de cytologie à partir d'un seul site en utilisant la technique approuvée (voir ci-dessous)

L'échantillon doit être appliqué à au moins 6 mm de l'extrémité givrée et à 1 mm de chaque bord pour s'assurer que l'échantillon entier peut être scanné pour ainsi faciliter l'interprétation pathologique clinique.

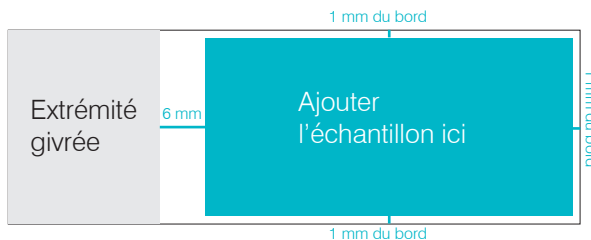

Approuvé pour IDEXX Digital Cytology

- Frottis sanguins (obtenir le comptage de cellules à l'aide d'un analyseur d'hématologie en clinique, tel que ProCyte Dx* ou LaserCyte Dx*)
- Aspiration à l'aiguille fine ou frottis d'empreinte des tissus solides, tels que :
 - Ganglions lymphatiques
 - Peau / masses sous-cutanées
 - Organes internes (rate, foie, prostate, intestin, poumon, rein, os, pancréas, autres)

- Frottis vaginaux
- Fluides (obtenir le comptage de cellules en utilisant ProCyte Dx ou LaserCyte Dx)
- Épanchements de la cavité corporelle (liquide abdominal, péricardique ou pleural)
- Liquide articulaire
- Sédiment urinaire (à sec)
- Lavage bronchoalvéolaire (LAB)

Approuvé pour la soumission de lames de verre aux Laboratoires de référence IDEXX UNIQUEMENT

- Liquide cébrospinal (LCR)
- Moelle osseuse
- Tout échantillon contenant un agent bactérien ou infectieux suspect

Non approuvé pour soumission avec IDEXX Digital Cytology OU lame de verre

- Sédiment urinaire humide
- Empreintes de bande en acétate
- Frottis fécaux
- Lames cassées

Colorez les lames en utilisant le protocole IDEXX Digital Cytology

Pour des instructions détaillées, voir le document *Comment colorer les lames pour IDEXX Digital Cytology*.

Numérisez et soumettez les lames avec l'appareil IDEXX Digital Cytology

Veiller à ce que :

- Chaque lames soient chargée dans le tiroir, face vers le haut.
- Les images soient nettes.
- Vous êtes satisfait de la représentation de l'échantillon et des cellules.
- Vous utilisez le contour de zone d'aperçu par défaut pour tous les types d'échantillons autres que les frottis sanguins. Pour les frottis sanguins, modifiez le contour pour inclure tout le bord de la langue de chat du frottis sanguin, si nécessaire.

Assurez-vous de recevoir vos résultats dans les 2 heures ou moins une fois le téléchargement des images numériques dans les Laboratoires de référence IDEXX

Remarque : Le réseau mondial IDEXX de pathologistes cliniques permet de lire des cas de pathologie clinique 24 h/24, 7 j/7 en 2 heures ou moins.

Soumettre 3 à 5 cas de test

Une fois l'appareil installé et votre personnel formé, nous vous recommandons d'utiliser IDEXX Digital Cytology pour soumettre **gratuitement** de 3 à 5 présentations de lames de pratique pour les commentaires de soumission d'échantillons d'un pathologiste IDEXX (l'interprétation des résultats ne sera pas fournie pour les soumissions de tests).

Lorsque vous remplissez la demande, assurez-vous de saisir **TEST** à la fois comme nom du patient et dossier clinique.

IMPORTANT : Pour vous assurer que les cas de test ne vous soient pas facturés, lorsque vous remplissez la demande, veuillez entrer **TEST** comme **prénom, nom de famille et antécédents cliniques**.