


Comment colorer les lames pour IDEXX Digital Cytology*

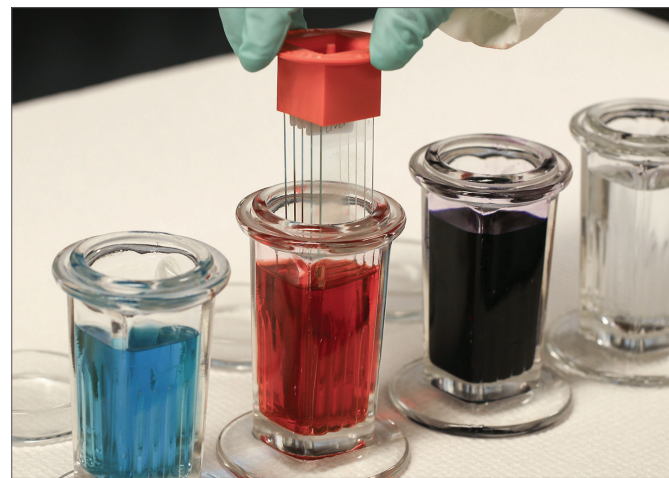

1. **Plongez** 3 fois
2. **Immergez** 30 secondes
3. **Tapotez** le bord de la lame contre un tissu absorbant



1. **Plongez** 3 fois
2. **Immergez** 5 secondes
3. **Tapotez** le bord de la lame contre un tissu absorbant



1. **Plongez** 3 fois
2. **Immergez** 5 secondes
3. **Tapotez** le bord de la lame contre un tissu absorbant



- Plongez** 5 à 10 fois pour enlever l'excès de colorant



1. **Plongez** 5 à 10 fois pour enlever l'excès de colorant
2. **Séchez à l'air** en utilisant le mode frais du ventilateur