

Test SNAP *Giardia*

Que faire avec votre résultat de test SNAP® *Giardia*

Résultat positif

Chez les chiens et les chats présentant des signes cliniques, *Giardia* peut être la cause de la diarrhée

Résultat négatif

Il est peu probable que *Giardia* soit la cause des signes cliniques

Que faire ensuite?

- Vérifier pour des infections parasitaires intestinales concomitantes en effectuant le test fécal oeufs et Parasites (OP) avec le test antigénique fécal : Profil Antigène Fecal Dx^{MC}—Code du test FDXP

- Vérifier pour des infections parasitaires intestinales concomitantes en effectuant le test fécal oeufs et Parasites (OP) et le test antigénique fécal Profil Antigène Fecal Dx^{MC}—Code du test FDXP

Traitement

- Traiter avec un médicament giardicide pour utilisation chez les chiens et les chats
- Laver l'animal infecté
- Décontaminer l'environnement de l'animal avec un désinfectant

- Vérifier pour les autres causes possibles de diarrhée en effectuant le bilan complet Diarrhée par RealPCR^{MC} Canin—Code du test CDCD Félin—Code du test FDCD

Suivi

- Il n'est pas recommandé de répéter le test si les signes cliniques disparaissent
- Si les signes cliniques persistent, investiguer pour les autres causes de diarrhée en effectuant le Bilan Complet Diarrhée par RealPCR :
Canine—Code du test CDCD
Feline—Code du test FDCD

Prévention

- Élimination appropriée des matières fécales de l'animal
- La vaccination contre *Giardia* n'est pas recommandée pour aucun animal