

Rotation des tests IDEXX SNAP

Votre guide de préchauffage quotidien

Qu'est-ce que la rotation?

La rotation consiste à ramener vos tests SNAP à température ambiante en les retirant du réfrigérateur et en les y replaçant à la fin de votre quart de travail. Les tests SNAP emploient la technologie ELISA, qui nécessite généralement une réfrigération en vue de maintenir un degré élevé de précision. En sortant vos tests du réfrigérateur au début de votre journée de travail, vous éliminez le temps d'attente nécessaire au préchauffage des tests, ce qui vous permet de réaliser des tests efficaces et précis tout au long de votre quart de travail.

Étape par étape :

- 1. Consulter le tableau (tourner la page) :** Référez-vous au tableau pour les températures et les limites en matière de rotation pour chaque produit SNAP.
- 2. Faire un suivi de l'heure :** Notez à quel moment vous sortez le produit du réfrigérateur afin de suivre la fréquence des rotations.
- 3. Ne pas déballer :** Conservez les tests SNAP dans leur emballage d'aluminium et le conjugué dans son flacon.
- 4. Utiliser selon les besoins :** Lorsque vous êtes prêt(e) à utiliser le test, aucun temps de préchauffage n'est requis!
- 5. Réfrigérer dans les temps :** Si le produit n'est pas utilisé, il faut le remettre au réfrigérateur dans le délai imparti (8 ou 14 heures, selon le produit).



EXIGENCES D'ENTREPOSAGE	NOM DU TEST	DURÉE MAXIMALE DE LA ROTATION	LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LA ROTATION
Température ambiante OU réfrigérateur (2 °C-25 °C ou 36 °F-77 °F)	SNAP® 4Dx® Plus [†]	14 heures	
	SNAP® Parvo	8 heures	
Réfrigérateur (2 °C-8 °C ou 36 °F-46 °F)	SNAP® Feline Triple®	14 heures	Peuvent avoir jusqu'à 30 rotations
	SNAP® cPL™	8 heures	
	SNAP® fPL™	8 heures	
	SNAP® Feline proBNP	8 heures	Peuvent avoir jusqu'à 5 rotations
	SNAP® FIV/FelV Combo Plus	8 heures	
	SNAP® Foal IgG	8 heures	
	SNAP® Giardia	8 heures	Le conjugué ne peut pas faire l'objet d'une rotation, et doit être conservé au réfrigérateur et au froid.

[†] La méthode de conservation peut influencer sur la date de péremption du test SNAP 4Dx Plus. Lorsqu'ils sont conservés à température ambiante, les tests sont périmés dans les 6 mois et ne peuvent être prolongés en les réfrigérant. Lorsqu'ils sont conservés au réfrigérateur, les tests expirent à la date indiquée sur l'emballage du produit.

Soutien pour chaque test SNAP

Chaque test SNAP vous donne accès à un écosystème de diagnostic complet. Cela comprend notamment les algorithmes de diagnostic, les consultants médicaux, les tests de suivi en laboratoire de référence, etc. Vous bénéficiez donc d'un soutien en clinique et bien au-delà.

Pour commander des tests SNAP, veuillez contacter votre distributeur local ou appeler le 1-888-79-IDEXX.



© 2023 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 09-2690983-00 • La politique de confidentialité d'IDEXX peut être consultée à idexx.ca/fr.

*4Dx, SNAP, SNAP Pro et VetConnect sont des marques de commerce ou des marques déposées d'IDEXX Laboratories, Inc. ou de ses affiliés aux États-Unis ou dans d'autres pays.