

Test SNAP® Combo FIV/FeLV

Précision du test

Sensibilité et spécificité du test SNAP® Combo FIV/FeLV

Comparaison du test	Taille de l'échantillon SNAP Combo FIV/FeLV Test de référence					Type d'échantillon	Limite de confiance à 95 % pour la sensibilité et spécificité relatives	Statistique Kappa
	+/+	-/+	+/-	-/-	Total			
PetChek® Test d'antigène FeLV	72	1	3	161	237	Sérum/plasma/sang entier	Sen., 98,6 % (95 % CL 91,8 % à 100 %) Spéc., 98,2 % (95 % CL 94,5 % à 99,6 %)	0,96
PetChek® Test d'anticorps FIV	43	3	0	191	237	Sérum/plasma/sang entier	Sen., 93,5 % (95 % CL 81,7 % à 98,3 %) Spéc., 100 % (95 % CL 97,6 % à 100 %)	0,96

La sensibilité et la spécificité sont basées sur l'interprétation visuelle des résultats du SNAP.

CL = limite de confiance

Pour l'interprétation des tests de rétrovirus et les algorithmes diagnostiques, veuillez consulter les lignes directrices de l'AAFP Feline Retrovirus Management, disponibles sur catvets.com/guidelines.