

Test SNAP® Feline proBNP

Précision du test

Corrélation avec la méthode de référence du test Cardiopet® proBNP

Une étude a été menée pour évaluer la corrélation entre le test SNAP® Feline proBNP et les résultats **quantitatifs** du test Cardiopet® proBNP¹

Résultats

Le test SNAP Feline proBNP :

- concordait à 99,5 % avec le test Cardiopet proBNP lorsque la concentration de NTproBNP était < 100 pmol/L.
- concordait à 95,0 % avec le test Cardiopet proBNP lorsque la concentration de NTproBNP était ≥ 270 pmol/L.

Pour les chats ayant une concentration de NTproBNP < 100 pmol/L, telle que mesurée à l'aide du test Cardiopet proBNP, les résultats au test seront normaux (la couleur de la pastille de l'échantillon est plus claire que celle de la pastille de référence).

Un résultat anormal au test indique que la concentration de NTproBNP est supérieure à 100 pmol/L, telle que mesurée à l'aide du test Cardiopet proBNP (la couleur de la pastille de l'échantillon est la même ou plus foncée que celle de la pastille de référence).

Référence

1. Données enregistrées aux Laboratoires IDEXX inc. Westbrook, Maine É.-U.